



**Folien einbauen:**

1. Gummiband befestigen

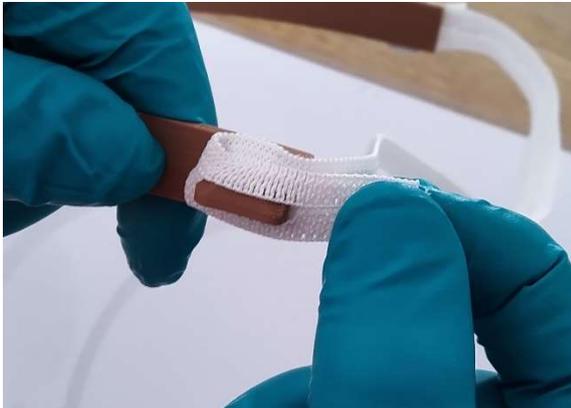

2. Die Folie in die beiden mittigen Pins am Bügel einhängen

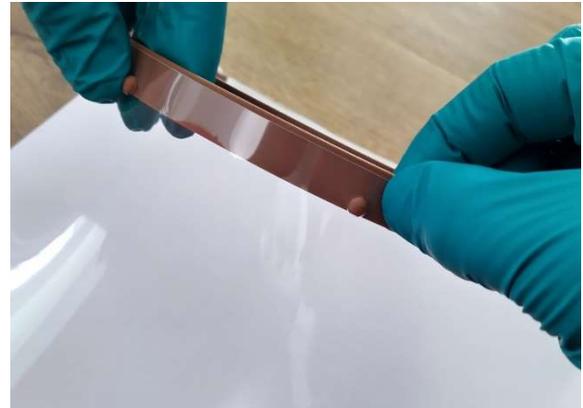

2. Die Folie Seite für Seite, mit leichtem Zug in die beiden äußeren Pins einklipsen und den Folienüberstand hinter die Lasche stecken



**Desinfektion:**

Bitte vor/nach Verwendung desinfizieren!

Empfohlen wird Desinfektionsmittel mit Isopropanol (IPA) >70% oder Ethanol >75%

Material Bügel: PLA    Material Folie: PVC 0,3mm

Vor Temperaturen über 55°C fernhalten! Z.B. im Auto in der Sonne können hohe Temperaturen entstehen!

Kein medizinisch getestetes Schutzschild! Die Schilde ersetzen keine Atemschutzmasken sondern dienen als zusätzlichen Schutz.